

Chemo Clean

잔류 항암제 세정티슈 케모클린



신고번호 제 HB24-01-0643호

- 유효기간 제조일로부터 1년
- 보관 30°C 이상의 장소에서 보관 금지

- 주의 사용 시 니트릴 장갑 등을 착용하세요
피부에 직접 닿지 않도록 주의하세요

Chemo Clean

잔류 항암제 세정티슈 케모클린

본 제품은 항암제 취급 시에 발생한 누출, 흘림, 뒹 등에 의해 항암제를 안전하게 세정하기 위한 3가지 주요 세정 물질을 각각 포함한 와이프 키트입니다.

첫번째 산화작용, 두번째 환원작용, 세번째 회수작용과 닦아내는 와이프 조작의 조합으로 청정화가 가능합니다. 사용방법 및 주의사항을 읽어보시고 바르게 사용하기 바랍니다.



사용방법

1. 1번 키트 차아염소산나트륨 용액이 있는 Wiper를 꺼내어 손바닥 크기로 펼쳐서 작업대 전체를 닦아 주십시오.
2. 약 1분 방치 후에 2번 키트 Wiper를 꺼내어 1번 키트와 동일하게 작업대를 청소합니다. 반드시 닦은 순서를 기억하고 똑같은 순서대로 닦아내야 합니다.
3. 약 1분 방치 후, 3번 키트를 개봉하여 앞서 닦은 순서대로 깨끗이 닦습니다.
4. 3번 키트로 닦아낸 후 작업대를 알코올 적신 거즈를 사용하여 청소를 종료하십시오.
5. 사용 후 와이프와 장갑 등은 의료폐기물로 폐기해 주세요.

사용상의 주의

- 사용에 있어서는 반드시 라텍스 장갑, 니트릴 장갑 등을 착용하시고, 피부에 직접 접촉하지 마세요.
- 1번 키트(차아염소산나트륨 Wipe)를 개봉할 때에 염소증기를 흡입하지 않도록 주의하시고 환기가 전혀 되지 않는 공간에서는 주의하세요. 조제 시와 동등한 개인보호구(장갑, 마스크, 보안경, 가운 등)를 착용하세요.
- 만일 염소증기를 흡입한 경우에는 즉시 신선한 공기의 통풍이 잘되는 장소로 이동하십시오. 또한 피부나 점막에 접촉한 경우는 흐르는 물로 충분히 씻어낸 후에 의사의 진찰을 받으세요.
- 케모클린은 반드시 사용 순서와 사용 간격을 지켜 주세요.
- 1번 키트는 보관 온도가 30°C가 넘지 않는 환경에서 보관하세요. 개봉 후 사용하지 않을 경우 화학 성분의 변화가 있을 수 있으니 밀봉하여 보관하세요.
- 본 제품은 약제조제대나 화학적 변화를 받지 않는 바닥면의 청정화에만 사용하십시오.
- 산성 물질 등 과산화수소와 함께 사용하지 마세요. (염소가스 발생으로 스테인레스에도 녹이 발생 됨)
- 의류, 천 제품, 목제품에 부착하면 뉘빠짐이 있을 수 있습니다.
- 타일, 합성수지제품, 도장면에 사용하면 변색될 수 있습니다.

참고 사용 실시의 예

사이클로포스파마이드 사용 후 케모클린을 사용한 세정 성능

*LC/MS/MS 분석에 의한 실험 예로, 실제 오염의 농도 및 사용자의 닦기 조작에 영향을 받기 때문에 보증 수치가 아닙니다.

오염수준	잔류량 (ng)	제거율 (%)
낮은 레벨(0.1ug/cm ²)	검출 한계 이하	99.9%
중간 레벨(0.5ug/cm ²)	검출 한계 이하	99.9%
높은 레벨(1.0ug/cm ²)	검출 한계 이하	99.9%